LECTURE D'IRM PROTOCOLE HEMOCHROMATOSE :

(Logiciel installé sur l'ordinateur d'IRM Dig (celui pres du cadre de porte qui mène à l'IRM Neuro)

1) Dans PACS, choisir patient, sur l'IRM en question, clic droit, EXPLORER,

Numéro	Etiquette	Date	Modali 🔼	N	Procédure	Séri	Parties ana
4		15/02/2018	MR	10	IronByMR 10 Echos_ 1e	N	LIVER
3		15/02/2018	MR	60	T2 Haste tra mbh 3mm	Ν	LIVER
5		15/02/2018	MR	10	IronByMR 10 Echos_ 2e	Ν	LIVER

- 2) Choisir la série de 10 images qui, des deux, montre le mieux à la fois du foie, de la rate et du muscle (paravetebraux), l'ouvrir.
- 3) Cliquer sur le triangle rouge :



- 4) SERIE, TOUT EN UN #10
- 5) EXPORTER, ENREGISTRER, ENREGISTRER SOUS, choisir : Format DICOMDIR, Sélection en cours et Résolution d'origine et enregistrer ça sur le bureau avec IPP ou Nom du patient.
- 6) Lancer MRQuantif dans Ordinateur, Disque Dur C, DATA, MRQuantif.jar
- 7) Retrouver sur MRQuantif le patient en question via le Bureau
- 8) Double cliquer simplement sur le foie pour placer le premier ROI, puis sur la rate, puis sur les muscles paravertebraux, puis dans l'air (bruit)
- 9) Choisir l'unité umol/g dans la colonne de gauche
- 10) Ouvrir l'onglet COMPTE-RENDU (ou TEXT), voilà le rapport de l'examen copier dans le rapport en supprimant la dernière phrase du paragraphe « charge hépatique en fer » qui parle des études.